




## Appareils concernés

KT / KTBOX / KF / KFISIO / KFISIOR / KFISIOV / KFISIOP

## Matériel nécessaire

- Biberon 220 ml
- Vacuomètre -1000 - 0hPa (-1/0 bar)

## Schéma de connexion

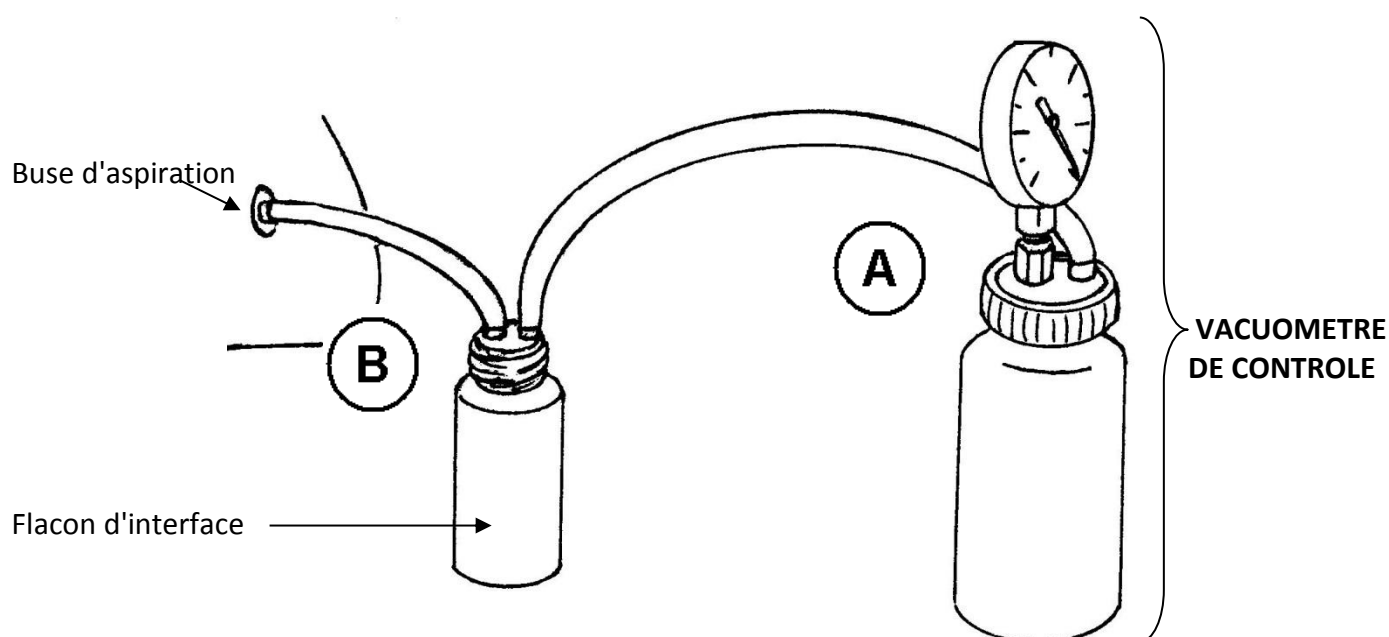

## Valeurs (@ 230V – 50Hz)

Buse ASPIRATION : biberon 220 ml et vacuomètre

Modèle d'appareil	DEPRESSION MINI	DEPRESSION MAXI	Cadence
KT	Inférieur à -200 hPa	> -350 hPa	Fixe
KTBOX			
KFISIO (*)	Inférieur à -200 hPa	> -300 hPa	Variable
KFISIOR			
KF			
KFISIOV			
KFISIOP			

(\*) KFISIO : avec filtre de protection en place sur la buse d'aspiration.